

オーティコン補聴器における、防水・防塵に関する注意事項

- 保護等級取得の有無に関わらず、オーティコンでは補聴器を水、又はそのほかの液体物に浸したり、洗ったりすることを推奨するものではありません。補聴器はスチームバス、シャワー、また（補聴器に直接触れるような）激しい雨といった湿気の多い状態にさらされることを想定してデザインされていません。
- オーティコン補聴器をお使いの際は取扱説明書における製品の取り扱いに関する注意事項を必ずお読みください。

製品取り扱い説明書における注意事項：高温、湿気、薬品等を避ける

補聴器を火に近付けたり、炎天下の車内などの高温の場所に長時間放置したりしないでください。また水や湿気にさらされると、補聴器の性能に影響が出る場合があります。入浴時やシャワーを浴びる時、大雨のときなどは必ず外して下さい。また絶対に電子レンジなどに入れて乾かさなないでください。

就寝時や装用しないときなどは、必ず補聴器から電池を取り出して、電池ぶたを開けたままドライケースにしまって下さい。取り出した電池は乾いた布で拭き、湿気を取って下さい。詳細はお買い上げの販売店へお問い合わせください。

補聴器を装用したまま、ヘアスプレー、香水、アフターシェーブ、虫除けスプレーなどを使用しないでください。補聴器の故障の原因になります。使用する際にはそれらが完全に乾いてから補聴器を使用してください。補聴器は、乾いた手で取り扱ってください。

日常のご使用に関して

- | 防塵・防水に関する保護等級を取得しているオーティコン補聴器において、誤って水に落としてしまった、または補聴器を水/湿気にさらしてしまった際には、下記の注意事項に従って対処下さい。
 - | 補聴器を水から取り出して下さい
 - | 電池を取り外して下さい
 - | 補聴器をきれいな乾いた布でふいて下さい
 - | 補聴器を5分程度空気にあてて乾かして下さい
 - | 新しい電池をセットし、補聴器の電源を入れて下さい
- | 下記については避けて下さい:
 - | シャワーを浴びる際には、補聴器を外して下さい
 - | 水泳やダイビングの際には、補聴器を外して下さい

Q オーティコンの製品の耐水機能の試験はどのように行っていますか？

A オーティコン製品はそれぞれ発売前に、社内施設において様々な機能テストを実施しています。一方で市場からの声に応え、客観性をもった第三者認証テストを実施しています。

Q オーティコンの製品は完全な防水型（waterproof）でしょうか？

A 完全防水ではありません。オーティコンの製品は日常生活防水（water resistant）であり IPx7の保護等級に求められる防水性能に基づく耐水です。オーティコン製品は湿気、水をはじくために主要なパーツにはナノコーティングを施しています。また計算された機械のバリア構造によって補聴器への水の侵入を防いでいます。